


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-05/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	AM-OSS-05/CCA
CODE	AM-OSS-05/CCA
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	AM-OSS-05/CCA

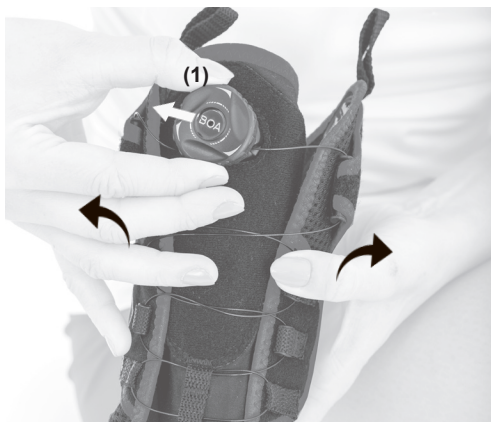

- 1. PL:** Przed założeniem rozepnij ortezę i poluzuj BOA® Fit System (1).
EN: Before using unfasten the brace and loosen the BOA® Fit System (1).




- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Place the brace on the ankle.



- 3. PL:** Za pomocą BOA® Fit System ustaw odpowiednią siłę naprężenia.
EN: Adjust the required compression with the BOA® Fit System.



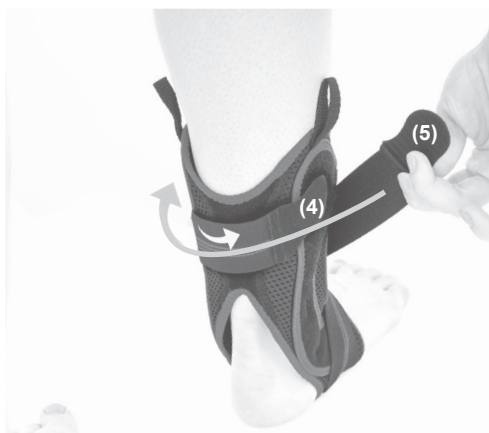

4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy ósemkowe (2,3) na rzepy (4,5) według wskazanego kierunku.

EN: Set the proper compression and fasten the Figure 8 straps (2,3) with Velcro (4,5) according to the indicated direction.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.