

INSTRUKCJA OBSŁUGI

But marszowy 17''

Kod produktu: TGO-E BM-C 609



But marszowy - 11'

Kod produktu: TGO-E BM-C 609-1

1. Wykonanie

But marszowy składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV, miękkiego materiału z tkaniną CoolMax stanowiącego wewnętrzną wyściółkę oraz stabilizacji pneumatycznej. Całość, poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów, umożliwia stały dostęp powietrza do skóry użytkownika oraz bardzo dobre odprowadzenie ciepła i wilgoci. Orteza została wyposażona w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z antypoślizgowym materiałem umożliwiającą pacjentowi chód możliwie fizjologiczny.

2. Zastosowanie

But marszowy należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie skokowym oraz dla poprawy czynności funkcjonalnych. But marszowy stabilizuje stopę i podudzie w położeniu pośrednim (neutralnym), w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

But marszowy należy stosować w przypadku:

- Leczenia pooperacyjnego
- Skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych
- Naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- Jako alternatywa do unieruchomienia gipsowego

- Złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego

3. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka
- Egzem skórnych
- Ran oraz innych uszkodzeń skóry
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających

Uwaga! W przypadku żylakowości podudzi stosowanie aparatu jest ograniczone. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia czy wyrób może zostać użyty w przypadku stosowania podkolanówek lub pończoch przeciw-żylakowych.

4. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Sposób zakładania

- W pierwszej kolejności w pozycji siedzącej z nogą lekko zgiętą w stawie kolanowym należy rozpiąć pasy obwodowe, wyciągnąć przednią część ortezy i odpiąć rzep wewnętrznej wyściółki.
- Ortezę należy założyć, a w razie konieczności zastosować dodatkowe poduszki wypełniające znajdujące się w zestawie. Materiał wyściółki należy zapiąć a następnie założyć przednią część ortezy i zapiąć pasy obwodowe na rzep.
- Jeżeli pasy obwodowe są zbyt długie należy przy pomocy nożyczek, przyciąć końce pasów na odpowiednią długość i zamontować rzepy tak, aby naciągając pas można było go swobodnie przypiąć do buta.

- Następnie należy sprawdzić poprawność zamocowanych pasów w pozycji stojącej, a w razie konieczności dopasować siłę dopięcia pasów obwodowych.
- Stabilizacja pneumatyczna regulowana jest przy użyciu zintegrowanej w ortezie pompki, która znajduje się w kieszonce w części przedniej. (Powietrze wpompowane jest od strony IN a wypompowywane od strony OUT)

Tabela rozmiarowa (rozmiar obuwia)

S	35-39 cm
M	40-44 cm
L	44-46 cm

6. Konserwacja

- Materiał pasów obwodowych i wewnętrzną wyściółkę można prać ręcznie lub mechanicznie w temp. do 30°C, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Należy pamiętać, aby w praniu rzepy były dobrze zapięte, aby nie zniszczyły materiału.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Szynę z PCV należy czyścić lekko nasączoną gąbką z mydłem.
- Po każdorazowym czyszczeniu należy przetrzeć szynę do sucha.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021